


DEKASEPTOL Gel


Listo en un abrir y cerrar de ojos.




Salivador ó manguera flexible de neblina de spray

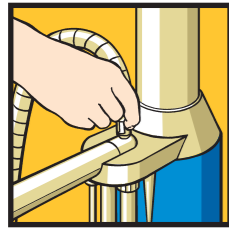


1. Aspirar agua fría de forma intermitente, p. ej. por medio del AQUAmat® de KaVo ...

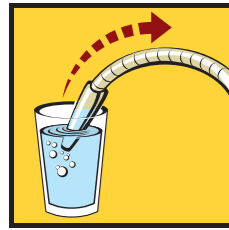


... ó de un vaso de plástico

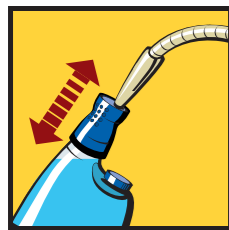

2. Con la pieza de mano de aspiración ó con la mano presionar una vez hacia abajo el dispositivo de dosificación

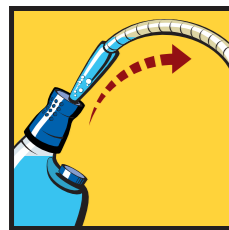

3. Aspirar DEKASEPTOL Gel del dispositivo de dosificación*
*con la manguera flexible gruesa de neblina de spray repetir los pasos 1-3

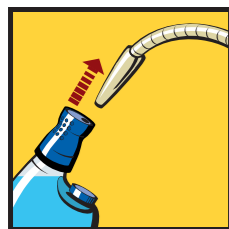

4. Retirar la manguera flexible y devolverla al soporte

Taza de escupidera



1. Presionar hacia abajo el dispositivo de dosificación



2. Verter DEKASEPTOL Gel en la taza de escupidera



3. Distribuir DEKASEPTOL Gel mediante un cepillo y dejar actuar



4. A continuación limpiar con el enjuague de taza y un cepillo



KaVo DEKASEPTOL Gel

Su depósito de confianza:

Le asesoramos de forma detallada y profesional. Y con mucho gusto.
Información también en Internet: www.kavo.com



Met.-Nr. 1500000 10/04-II es. Se reserva el derecho a modificaciones técnicas. Ligeros diferencias respecto a los colores se deben a la impresión. © Copyright: KaVo Dental GmbH.

KaVo DEKASEPTOL Gel

Das cocogéniale Desinfektions- und Reinigungsmittel.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental GmbH, D-88400 Biberach/Riß - Telefon +49 73 51 56-0 - Fax +49 73 51 56-1488 - Internet: www.kavo.com



KaVo. Dental Excellence.

DEKASEPTOL Gel

Atención,

Orden en la jungla de los gérmenes.

Zona de peligro: Unidad de aspiración. La suciedad se establece, bacterias, hongos y virus se extienden y dan caza a su salud. ¡Combata Vd. los gérmenes con las armas de la naturaleza!

El agente principal del DEKASEPTOL es la glucoptamina – un derivado de las sustancias contenidas en el coco. La glucoptamina es un agente anti-microbio que supera con creces a biguanidas o derivados del fenol respecto a fuerza y profundidad. Limpieza e higiene para la unidad de aspiración, el desagüe y la taza de escupidera.

Y para Vd. una razón para estar radiante: Porque lo que complica la vida a las bacterias y virus le facilita a Vd. el trabajo. ¡Pero mire Vd. mismo!

Seguro – limpio – económico – rápido:

- Altamente eficaz: Bactericida, tuberculocida, virucida, fungicida
- Económico: El bidón de relleno de 6 litros
- No contaminante: Libre de aldehído, fenol, cloro
- Ahorra tiempo: Directamente listo para el empleo gracias a la bomba de dosificación
- Práctico: Sin mezcla
- Solicitada la inclusión en la lista – DGHM

DEKASEPTOL:

- **limpia**
- **desodoriza**
- **desinfecta:**

bactericida	✓	tuberculocida	✓
fungicida	✓	HBV - activo	✓
virucida	✓	HIV - activo	✓

First choice – best value.



DEKASEPTOL Gel

Listo,

Sin remover, sin agitar, sin mezclar.

¡Olvídense Vd. de la mezcla laboriosa y la aplicación complicada! DEKASEPTOL es una mezcla ya preparada y se puede aplicar directamente: Inmediatamente.

Cuidese Vd. y sus aparatos: Sin mezclar significa también sin errores de mezcla, sin contacto con manos sensibles, sin superficies de trabajo sucias, sin muchos materiales. Un asunto limpio desde todos los puntos de vista.

Realmente económico. Gracias al dispositivo de dosificación económico no pierde y malgasta nada. Relleno fácil con el ventajoso bidón de 6 litros.

Evacuación sin problemas. Lo que procede de la naturaleza también está en armonía con ella. DEKASEPTOL es ecológicamente inofensivo y según las normas de la OCDE es biodegradable de forma sencilla y rápida.

DEKASEPTOL Gel

¡Ya!

Terminar antes – disfrutar más.

¡Gane Vd. tiempo! DEKASEPTOL no sólo es fácil de manejar sino también rápido. Aspirar el gel sencillamente en las mangueras flexibles y distribuirlo en la taza de escupidera. Dejar actuar. Esto es todo.

¿En la jungla después de las 20 horas? Ya no más. Porque con DEKASEPTOL Vd. ahorra minutos valiosos en cada unidad de aspiración.

¿„Pequeñeces” dice Vd.? „Nada de eso”, decimos nosotros. Por si Vd. hace un cálculo rápido, verá que el resultado es un ahorro de tiempo de 20 minutos a la semana.

Resulta que son dos días laborales completos al año. Tiempo que puede aprovechar mejor gracias a DEKASEPTOL. Acabar antes – disfrutar más.

