


Opalescence™  
tooth whitening systems



**VIELEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN.**

Gern sind wir auch weiterhin für Sie da,  
wenn es um ein schönes und gesundes Lächeln geht.

**IHR PRAXISTEAM**

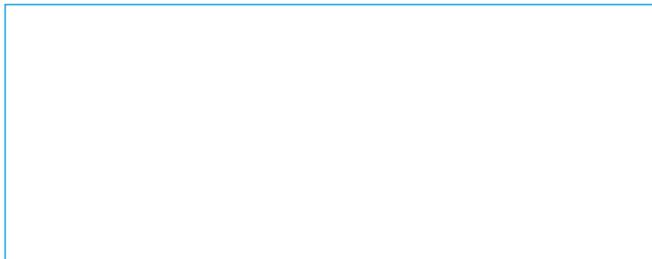

**ERFAHREN SIE MEHR AUF  
OPALESCENCE.COM/DE**

UPP 228-DE 02-2022

© 2022 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.



FOLGEN SIE UNS!



Opalescence™  
tooth whitening systems



**#1  
IN DER  
PROFESSIONELLEN  
ZAHNAUFHELLUNG  
WELTWEIT**

**ANWEISUNGEN FÜR DIE ZAHNAUFHELLUNG  
ZU HAUSE MIT OPALESCENCE™ PF**

## ZAHNAUFHELLUNG MIT OPALESCENCE™ PF

- ❑ Opalescence™ PF 10%, Tragezeit 8-10 Stunden nachts\*
- ❑ Opalescence™ PF 16%, Tragezeit: 4-6 Stunden/Tag\*

\*Sofern nicht anders empfohlen.

Liebe Patientin, lieber Patient,

Sie haben sich zu einer Zahnaufhellung mit individuellen Schienen entschieden, die vorwiegend zu Hause durchzuführen ist. Bitte beachten Sie bei der Anwendung folgende Punkte:



Sie sollten Ihre Zähne vor der Anwendung putzen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Füllen Sie das Aufhellungsgel in die Schiene. Verwenden Sie ca. 1/3 bis 1/2 einer Spritze. Nehmen Sie zum Füllen der Schiene nur das Gel, welches Sie von uns für diesen Zweck erhalten haben.

Setzen Sie die Schiene über die Zahnreihe. Drücken Sie sie an den Seiten sanft an.

Entfernen Sie austretendes, überschüssiges Gel mit einer weichen Zahnbürste oder einfach mit einem Finger. Spülen Sie den Mund zweimal mit Wasser und spucken Sie es aus.



Zur Tragezeit und -dauer folgen Sie den Anweisungen, die Sie von uns erhalten haben.

Nach der Tragezeit entfernen Sie die Schiene und putzen Sie Ihre Zähne. Spülen Sie Ihren Mund mehrere Male, um sicherzustellen, dass kein Gel zurückbleibt. Die Schiene reinigen Sie nach Gebrauch mit einer weichen Zahnbürste und kaltem Leitungswasser.

Legen Sie die Schiene nach Gebrauch und Reinigung in die Aufbewahrungsbox. Auch nach Abschluss der Behandlung sollten Sie die Schiene in dieser Box aufheben, für eventuelle spätere Auffrischungsbehandlungen.

## ALLGEMEINE HINWEISE:

- Eine kosmetische Zahnaufhellung bei Personen unter 18 Jahren ist gesetzlich nicht zulässig.
- Die Produkte des Opalescence Zahnaufhellungssystems dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Schwangere oder stillende Frauen oder Patient:innen mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen sollten keine Zahnaufhellung durchführen lassen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihr medizinisches Fachpersonal.
- Überprüfen Sie das Haltbarkeitsdatum und schützen Sie das Zahnaufhellungsgel vor Sonneneinstrahlung und Hitze. Kühl lagern. Nicht einfrieren.
- Zahnaufhellungsgel nicht schlucken.
- Kronen, Brücken, Teilprothesen, Veneers und Kompositfüllungen können nicht aufgehellt werden.
- Manche Amalgam- oder „Silber“-Füllungen können die Tiefziehschienen dunkelviolett verfärben. Das ist normal.
- Regelmäßige zahnärztliche Kontrollen und Reinigungen vor und nach einer Zahnaufhellung sind wichtig für ein gesundes Lächeln.

## HINWEISE ZUR ZAHNAUFHELLUNG:

- Hellen Sie die Zähne nie mit Bleichmitteln für den Haushaltsgebrauch auf.
- Bei Fragen zur sachgemäßen Anwendung dieses Produkts sowie zur Dauer der Aufhellungsbehandlung, wenden Sie sich bitte an Ihr zahnärztliches Fachpersonal.
- Verzichten Sie auf den Konsum von Tabakwaren und Lebensmitteln solange Sie die Trays im Mund tragen.
- Bei manchen Patient:innen kann es während der Aufhellungsbehandlung zu Empfindlichkeiten kommen. In diesem Fall unterbrechen Sie die Behandlung unverzüglich und kontaktieren Sie Ihr zahnärztliches Fachpersonal.
- Bei manchen Patient:innen kommt es zu vorübergehenden Beschwerden im Bereich von Zahnfleisch, Lippen, Rachen oder Zunge. Falls diese Symptome länger als zwei Tage andauern oder sich kontinuierlich verschlechtern, wenden Sie sich an Ihr zahnärztliches Fachpersonal. Diese Nebenwirkungen klingen normalerweise innerhalb von ein bis drei Tagen nach dem Abbruch der Behandlung ab.
- Durch den Konsum von Kaffee, Tabak und anderen Produkten können sich Ihre Zähne im Laufe der Zeit erneut verfärben. In diesem Fall können Sie Ihre Zähne innerhalb weniger Nächte erneut mit dem Opalescence Aufhellungsgel aufhellen.
- Weiße Flecken, die während der Behandlung auf dem Schmelz erscheinen, können im Laufe der weiteren Behandlung wieder abklingen.
- Die Zähne sind von Natur aus am Zahnfleischrand etwas dunkler. In diesen Bereichen kann die Aufhellung länger dauern als auf der restlichen Zahnoberfläche. Normalerweise bleiben diese Bereiche etwas dunkler.

Bitte halten Sie die Kontrolltermine ein, die wir mit Ihnen vereinbart haben.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an uns, wir informieren Sie gern!